

GEBRUIKSAANWIJZING KOFFER-MASSAGEBANK

ALGEMEEN

- Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en volg de onderhoudsinstructies op.
- Gebruik deze massagebank uitsluitend t.b.v. het masseren van personen tot 200kg. Gebruik voor andere doeleinden kan schade en lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Deze massagebank opstellen op vaste en gelijke ondergrond.
- Zorg ervoor dat bij het uitzetten en sluiten van de massagebank Uzelf of iemand anders niet met handen, voeten of andere lichaamsdelen tussen bewegende delen kan komen.
- Tijdens het gebruik dienen alle poten uitgeklappt te zijn en dienen de uitzetijzers ten allen tijde vergrendeld te zijn d.m.v. een schuifbus.

SPECIFICATIES

- Draagbare massage bank bestaand uit een raamwerk van aluminium hoekprofiel en een met kunstleer bedekt ligdeel.
- De drie-delige bank heeft een verstelbaar hoofddeel.
- De bekleding is niet anti-statisch, conform DIN-ISO 10993-5.
- Maximale belasting 200 kg.

UITKLAPPEN VAN DE MASSAGEBANK

- Open de sluiting.
- Klap de 2 delen van de massagebank uit Houdt hierbij de bank op de zijkant.
- Klap de middelste poten als eerste uit, daarna de beide buitenste poten.
- Vergrendel de uitzetijzers middels de schuifbussen op alle poten (6 stuks in totaal).
- Plaats de massagebank behoedzaam in de juiste positie.
- De massagebank is klaar voor gebruik.

GEBRUIK VAN HET HOOFDDEEL (uitsluitend bij 3-delige bank)

Hoofddeel omhoog

- Ontgrendel d.m.v. schuifgrendel.
- Hoofddeel omhoog trekken.

Hoofddeel omlaag

- Houdt met een hand het hoofddeel vast, en bedien met de andere hand de kantelsteun via de onderkant van het aluminium frame. Zorg er voor dat uw hand niet tussen het frame en het hoofddeel komt.
- Het hoofddeel langzaam laten zakken totdat de glijstangen parallel lopen aan het hoofddeel.
- Vergrendel het hoofddeel middels de schuifgrendel.

INKLAPPEN VAN DE MASSAGEBANK

- Indien het hoofddeel omhoog staat, deze eerst geheel omlaag plaatsen, en vergrendelen middels schuifgrendel.
- Plaats de massagebank behoedzaam op de zijkant.

- Ontgrendel de uitzetijzers.
- De uitzetijzers dienen naar binnen toe ingeklapt te worden.
- Klap de buitenste poten als eerst naar binnen, als laatste dienen de middelste poten ingeklapt te worden.
- Sluit de massagebank. Vergeet hierbij niet de sluiting dicht te doen.

ONDERHOUD

- Voor het reinigen van de bekleding een sopje gebruiken.
- Geen alcohol of oplosmiddelen gebruiken.
- De glijstangen van het hoofddeel NOOIT invetten of smeren.
- De massagebank moet regelmatig nagekeken worden op eventueel loszittende bouten en moeren.